

## เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์

เลนส์สัมผัส โอซีเลนส์ (เอตาฟิลคอน เอ)  
เดลี ดิสโพสซิเบิล ซอฟท์ (ไฮโดรฟิลิก)  
Ocylens (Etafilcon A) Daily Disposable  
Soft (Hydrophilic) Contact Lenses  
เลนส์สัมผัสเนื้อนิ่ม รายวัน ชนิดใช้ครั้งเดียว

### พารามิเตอร์ของเลนส์สัมผัส

กำลังหักเห : +6.00 ถึง -12.00 Diopter  
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง : 13.8 ถึง 14.5 มิลลิเมตร  
รัศมีความโค้ง : 8.1 ถึง 9.0 มิลลิเมตร  
วัสดุที่ใช้ : เอตาฟิลคอน เอ (Etafilcon A) ในน้ำยา  
บัฟเฟอร์ชาไลน์  
วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่อแก้ไขความผิดปกติของสายตา  
วิธีการใช้ : ใช้ครอบบนกระจกตา  
วิธีการเก็บรักษา : เลนส์สัมผัสที่ยังไม่เปิดใช้ ให้เก็บที่อุณหภูมิห้อง  
ในที่แห้ง และไม่โดนแสงแดด  
ระยะเวลาการใช้งาน : ใช้งานได้ไม่เกิน 1 วัน  
ชนิดใส่และถอดทุกวัน

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย

### ขั้นตอนการใส่เลนส์สัมผัส

- ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง ก่อนจับเลนส์สัมผัสทุกครั้ง
- วางเลนส์สัมผัสบนปลายนิ้วชี้ข้างที่ถนัด ตรวจสอบรูปรอง  
ให้ถูกต้อง ถือขอบเลนส์ตั้งขึ้นเหมือนขอบถ้วย



ถูกต้อง



ผิดด้าน

- ใช้นิ้วกลางข้างที่ถือนเลนส์สัมผัสดึงเปลือกตาล่างลง  
แล้วใช้นิ้วกลางของมืออีกข้างดึงเปลือกตาบนขึ้น
- มองตรงๆ ไปที่กระจก ใช้นิ้วชี้วางเลนส์สัมผัสตรงกลาง  
กระจกตาเบาๆ
- เหลือบมองลงด้านล่าง แล้วค่อยๆ ปล่อยมือ
- กะพริบตาและหลับตาสักครู่ จนเลนส์สัมผัสไปอยู่ที่  
กระจกตา

### ขั้นตอนการถอดเลนส์สัมผัส

- ล้างมือให้สะอาด เช็ดให้แห้ง มองที่กระจก ใช้นิ้วกลางดึง  
เปลือกตาล่างลง แล้วใช้นิ้วกลางอีกข้างดึงเปลือกตาบนขึ้น
- ใช้นิ้วชี้เลื่อนเลนส์สัมผัสมาที่บริเวณตาขาวส่วนล่าง ค่อยๆ  
หยิบเลนส์สัมผัสออกโดยใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ ห้ามใช้เล็บ

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์  
ที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ.....  
(นายอรชรฐาน เทียนขาว)

วันที่.....  
19 ม.ย. 2562

28/05/62

### คำแนะนำ

การใช้เลนส์สัมผัสควรได้รับการสั่งใช้และตรวจติดตามทุกปีโดยจักษุแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์เท่านั้น

### คำเตือน

การใช้เลนส์สัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ที่ผิดวิธี มีความเสี่ยงต่อการอักเสบหรือการติดเชื้อของดวงตา อาจรุนแรงถึงขั้นสูญเสียสายตาทันที

### ข้อห้ามใช้

- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสนานเกินระยะเวลาใช้งานที่กำหนด
- ห้ามใช้เลนส์สัมผัสร่วมกับบุคคลอื่น
- ห้ามใส่เลนส์สัมผัสทุกชนิดเวลานอน ถึงแม้จะเป็นชนิดใส่นอนได้ก็ตาม ควรถอดล้างทำความสะอาดทุกวัน

### ข้อควรระวังในการใช้

- ผู้ที่มีสภาวะของดวงตาผิดปกติ เช่น ต้อเนื้อ ต้อลม ตาแดง กระจกตาไวต่อความรู้สึกลดลง ตาแห้ง กระจกตาไม่เต็มที่ไม่ควรใช้เลนส์สัมผัส
- ไม่ควรใส่เลนส์สัมผัสขณะว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดการติดเชื้อที่ตาได้
- ล้างมือฟอกสบู่ให้สะอาดทุกครั้งก่อนสัมผัสเลนส์
- หากเกิดอาการผิดปกติ เช่น เจ็บหรือปวดตาเป็นอย่างมาก ร่วมกับอาการแพ้แสง ตามัว น้ำตาไหลมาก หรือตาแดง ให้หยุดใช้เลนส์สัมผัสทันทีและรีบพบจักษุแพทย์โดยเร็ว
- ห้ามใช้เลนส์สัมผัสถ้าภาชนะบรรจุอยู่ในสภาพชำรุดหรือถูกเปิดก่อนใช้งาน

### ความหมายของสัญลักษณ์

- POWER = กำลังหักเห  
D = หน่วยกำลังหักเห (Diopter)  
B.C. = รัศมีความโค้ง (Base Curve)  
DIA. = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (Diameter)  
⊗ = สำหรับใช้ครั้งเดียว  
STERILE = ทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ  
LOT = เลขที่ครั้งที่ผลิต (Lot Number)  
EXP. 8 = เดือน ปี ที่หมดอายุ

### ผลิตโดย

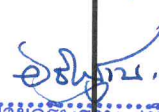
PEGAVISION CORPORATION  
2F-1, No. 5, Shing Yeh St., Guishan Dist.,  
Taoyuan City 333, Taiwan (R.O.C.)

### นำเข้าโดย

บริษัท เวสเทิร์น ไบโอเทค (ประเทศไทย) จำกัด  
98/27 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ในประเทศ

เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์  
ที่ได้รับอนุญาต

ลงชื่อ   
(นายอริชฐ์ เทียนขาว)  
เภสัชกรปฏิบัติการ  
วันที่ 19 ส.ค. 2562

หม่อมหลวง